



Conservação e Necropsia

MANUAL DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO

Carro Pantográfico



Modelo
CPTG

Tensão 220v - Mono

ÍNDICE

PARABÉNS!	2
RESPONSABILIDADE	3
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	4
INSTRUÇÕES DE USO	4
Para desligar o equipamento basta retirar o plugue da tomada e enrolar o cabo novamente no suporte instalado na estrutura do carro	4
LIMPEZA	4
Antes de fazer qualquer limpeza, desligue a tecla de energia, não há necessidade de desligar o disjuntor geral	5
Não jogue água no painel do equipamento, pois a água pode entrar pelo painel e cair nos componentes elétricos causando danos ao equipamento	5
SOLUÇÃO DE PEQUENOS PROBLEMAS	5
INFORMAÇÃO AMBIENTAL:	5
TERMO DE GARANTIA	7
ANOTAÇÕES	8
ASSISTÊNCIA TÉCNICA:	11

PARABÉNS!

Você adquiriu um produto com a qualidade Refricorpos. Nossos produtos são fabricados para fazer parte de seu dia a dia proporcionando conforto, segurança e produção.

Conservação e Necropsia

A Refricorpos é uma das mais tradicionais e conceituosas empresas no país no ramo de conservação e necropsia, preza pela qualidade e durabilidade de seus produtos, bem como, pela total satisfação dos seus consumidores.

Esperamos manter sua preferência pela marca Refricorpos, sempre que precisar de equipamentos de alta tecnologia e qualidade.

Obrigado por escolher a Refricorpos.

Neste manual você encontrará todas as informações necessárias para uso, segurança e preservação de seu equipamento.

RESPONSABILIDADE

Este manual é dedicado aos responsáveis e operadores devendo ficar à disposição para consulta sempre que necessário acompanhado com os certificados de calibração (se houver).

É obrigatória a leitura deste manual por parte dos operadores, mesmo aqueles que já têm experiência, devem ler o manual para se atualizar com os novos procedimentos de segurança.

No final deste manual se encontra o “Termo De Garantia e Responsabilidades”, como também a etiqueta de identificação do equipamento.

Este manual pode esclarecer qualquer dúvida, mas se necessário, um treinamento sobre o uso pode ser contratado através do suporte técnico.



Leia o manual de instruções antes da operação, antes de solicitar serviços em garantia, leia o “Termo de Garantia e Responsabilidade”.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Passo 1: Posicionar o carro pantográfico próximo da mesa necropsia ou da câmara mortuária onde será colocado ou retirado o corpo.

Passo 2: Desenrolar o cabo que está alojado na estrutura do carro,

Passo 3: Ligar o cabo em uma tomada 220V, tomada padrão brasileiro.

Passo 4: Após ter ligado na tomada, acionar o controle que contém dois botões de operação (desce e sobe),

Passo 5: Elevar o plano nivelando com outro plano onde será removido o corpo.

Passo 6: Depois de colocado o corpo descer o plano e desligar o cabo da tomada para transportar.

Obs.: nunca transitar o carro com o plano elevado, pode ocasionar acidentes graves.

INSTRUÇÕES DE USO

Para desligar o equipamento basta retirar o plugue da tomada e enrolar o cabo novamente no suporte instalado na estrutura do carro.

Nunca mantenha o equipamento desligado/estacionado com o plano elevado. Nunca execute manobras bruscas com a carga ou gire em alta velocidade. Não ultrapasse a capacidade de carga máxima indicada 150kg. Nunca se mova ou execute manobras em alta velocidade quando a carga estiver elevada. Trafegue em pisos planos, nivelados e isentos de buracos.

LIMPEZA

Conservação e Necropsia

Antes de fazer qualquer limpeza, desligue a tecla de energia, não há necessidade de desligar o disjuntor geral.

Não jogue água no painel do equipamento, pois a água pode entrar pelo painel e cair nos componentes elétricos causando danos ao equipamento.



Observe a etiqueta acima, ela está presente no painel de acionamento dos componentes elétricos, não use jato de água para limpeza, principalmente sobre o painel de comandos elétricos.

SOLUÇÃO DE PEQUENOS PROBLEMAS

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
Plano não está subindo	Plugue fora da tomada	Verificar se carro está ligado em uma tomada 220V.
Equipamento não liga	Cabo do controle está desconectado do modulo	Abrir caixa de comando e verificar se o plugue do controle está conectado
O plano ao subir está pendendo somente para um lado	O peso não está distribuído uniformemente	Ao colocar o corpo sobre o carro deixá-lo bem centralizado no plano
As rodas do carro estão travando	O freio pode estar acionado ou rodízio está danificado	Verificar se o rodízio está travado ou se estiver danificado acionar a assistência técnica

INFORMAÇÃO AMBIENTAL:

Conservação e Necropsia

A REFRICORPOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. Comercializa produtos que atendem à legislação que regula a restrição e controle de substâncias nocivas ao meio ambiente. Este produto e sua embalagem foram construídos com materiais que podem ser reciclados. Assim, ao descartar a embalagem separe-a para que seja coletada por recicladores. Ao descartar o produto, procure empresas de reciclagem, observando o atendimento à legislação local.

SIMBOLOGIA E ETIQUETAGEM.



Símbolo “advertências de segurança” não ignore as recomendações com este símbolo



Símbolo “equipotencial” Possibilita o aterramento em conjunto de vários equipamentos.



Símbolo de “Terra” Ponto de conexão do aterramento do equipamento.



Símbolo “Raio” Tampas de compartimentos e quadros dos sistemas elétricos, contem cargas vivas eletrificadas mesmo com o equipamento desligado, mas conectado a tomada.



Etiqueta de orientação à leitura do manual de instruções.



Etiqueta de indicação para não usar jato de água no equipamento ou sobre os painéis elétricos

Conservação e Necropsia



Acima etiquetas de orientação e responsabilidades com o uso dos equipamentos

TERMO DE GARANTIA

A Refricorpos Equipamentos Industriais garante seus produtos contra defeito de **fabricação** por um período de 12 meses.

Condições gerais: A garantia dos equipamentos dentro do prazo estabelecido é de responsabilidade da Refricorpos, ficando qualquer causa ou defeito **condicionado a análise** por parte da Assistência Técnica e seus Credenciados.

A garantia só será válida desde que efetuada pela Refricorpos e seus Credenciados, ou autorizado à manutenção por terceiros. Para equipamentos que requer montagem ou instalação a garantia só será válida se for executada pela Refricorpos ou seus credenciados (Veja contrato de vendas).

Para todos os equipamentos em geral, o cliente deverá obrigatoriamente realizar uma vistoria prévia para verificar possíveis danos causados pelo transporte como amassados, riscos etc. É de responsabilidade do cliente a verificação do equipamento na hora do recebimento incondicionalmente. A partir da entrega, danos de qualquer natureza não serão mais cobertos pela garantia (Inclusive falta de acessórios e vidros).

Não incluem na garantia defeitos ou danos causados por fenômenos naturais, vândalos, furtos, roubos ou por qualquer tipo de animais ou pragas.

A garantia não cobre qualquer manutenção efetuada sem o conhecimento ou autorização por parte da Assistência Técnica, defeitos causados por mau uso, uso do equipamento para produtos impróprios, fora da faixa específica, falta de manutenção preventiva ou ambiente muito quente sem troca de calor.

A Refricorpos não executa pela garantia manutenção de limpeza ou desencrostamento de gordura, qualquer defeito causado por este tipo de sujeira não será coberto pela garantia.

A Refricorpos não autoriza nenhuma modificação ou adaptação em seus equipamentos, nem terceiros executar tais serviços em seu nome, exceto se realizados nas dependências da Refricorpos ou por seus credenciados mediante autorização por escrito.

Responsabilidade: A Refrigicorpos atende conforme as normas do *Código Do Consumidor*, porém este atendimento é restrito ao horário comercial. Após este horário, fins de semana ou feriados não há expediente para atendimento (exceto se contratado atendimento extra com a Assistência Técnica ou seus credenciados).

ANOTAÇÕES

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal black ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general writing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Conservação e Necropsia

Conservação e Necropsia

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Para representantes autorizados
Entrar em contato com a central
Fone (11) 2832-8066 / 2832- 8094

Conservação e Necropsia

Conservação e Necropsia

E-mail vendas@refricorpos.com.br



DIVISÃO GRUPO COZIL.

Rua Botucatu, nº200-A Nossa Senhora Da Ajuda.
CEP 08576-660 Itaquaquetuba Grande São Paulo – SP
PABX (11) 2832-8080 FAX (11) 2832-8090
www.refricorpos.com.br
cozil@cozil.com.br
www.cozil.com.br